

Hızlı Başvuru Kartı



NOT: Bu belge tam bir kullanım kılavuzu değildir. Kullanım talimatlarının tamamı, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve potansiyel ters olaylar için "Kullanım Kılavuzuna" başvurun.

Hastada kardiyak arrestini doğrulayın ve LUCAS hazır oluncaya kadar olabildiğince az ara vererek manuel CPR başlatın.

Çantayı açın:

- Çantayı açmak için çanta üzerindeki kırmızı kolu çekin.

Cihazı Açma: (A)

- **AÇ/KAPAT**  düğmesini 1 sn basılı tutun. LUCAS 2 kendi kendini otomatik olarak test ettikten sonra çalışmaya başlayacaktır. (AYAR'ın  yanındaki yeşil LED yanar.)

Sırt plakası: (B)

- Manuel CPR'a ara verin.
- Sırt plakasını hastanın altına, koltuk altlarının aşağısına gelecek şekilde yerleştirin.
- Manuel CPR'a devam edin.

Kompresör: (C)

- LUCAS 2'yi çantadan çıkartın.
- Açma halkalarını bir kez çekerek mandal kilitlerinin açıldığını kontrol edin, sonra halkaları serbest bırakın.


- Manuel kompresyonları durdurun.
- Sırt plakasına takın; "tık" sesini duymalısınız.
- Yukarı doğru bir kez çekerek takıldığından emin olun.





Vakum başlığını yerleştirin:

- Vakum başlığını göğüs üzerinde ortalayın.
- Vakum başlığının alt kenarı sternumun alt ucunun hemen üzerinde olmalıdır.

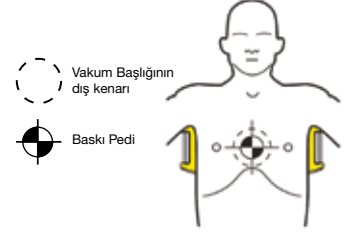

Derinlik: (D)

- Sistemin AYAR modunda olduğundan emin olup, iki parmağınızla vakum başlığını aşağı doğru itirin.
- Vakum başlığı içerisindeki baskı pedi hastanın göğsüne dokunuyor olmalıdır.
- Eğer ped uygun biçimde oturmazsa ya da göğse dokunmazsa, kompresörü kaldırın ve manuel kompresyona devam edin.
- **DURAKLAT** (II) düğmesine basarak başlama konumunu sabitleyin ve sonra parmaklarınızı vakum başlığından çekin.



Başla (E) – kompresyonu başlatın:

- Sistemin uygun biçimde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin; gerekirse ayarlayın.
- BAŞLAT (sürekli) (▶) ya da BAŞLAT (30:2) düğmesine basın (▶ 30:2).
- LUCAS 2 çalışırken hastayı yalnız bırakmayın.



Takip et (F) – stabilizasyon kayışını bağlayın:

- Kayışı çıkartın ve tokalarından sonuna kadar uzatın.
- Destek yastığını hastanın boynunun altına yerleştirin.
- Yastık kayışlarını LUCAS 2 kayışlarına sabitleyin.
- Kayışları sıkılaştırın.
- Tedaviyi engelleyebileceği veya geciktirebileceği durumlarda stabilizasyon kayışlarının kullanımını erteleyin.



EKG analizi esnasında kompresyonu durdurmak için **DURAKLAT** (II) düğmesine basın.

Kesintileri minimum seviyede tutun.

LUCAS 2, yalnızca Avrupa Resüsitasyon Konseyi veya dengi kurumların kılavuzlarına uygun CPR kursunu tamamlamış ve LUCAS 2'nin kullanımı konusunda eğitim almış ilk müdahale personeli, ambulans personeli, hemşireler, doktorlar veya sağlık çalışanları gibi temel tıbbi becerilere sahip kişiler tarafından kullanılmalıdır. LUCAS 2, cihazın kilitlemesini önleyecek kadar cüseli ya da vakum başlığındaki baskı pedinin göğüsle temas edemeyeceği kadar zayıf olan hastalarda kullanım için uygun değildir.

Kullanım talimatlarının tamamını görmek için cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.

Daha fazla bilgi için lütfen yerel Physio-Control temsilcinizle temasa geçin ya da www.physio-control.com adresindeki sitemizi ziyaret edin.

**PHYSIO
CONTROL**

Physio-Control Merkezi
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 ABD
Tel 425 867 4000
Faks 425 867 4121
www.physio-control.com

Physio-Control Operations
Netherlands B.V.
HQ Europe, Middle East & Africa
UP Office Building
Piet Heinkade 55,
1019 GM Amsterdam NL
Tel +31 (0)20 7070560
Faks +31 (0)20 3391194
www.physio-control.com

Physio-Control Distribution Partner /
Physio-Control Dağıtıcı Ortağı: